

Vital Care Kit

SaluberMD
Better health, better you

คู่มือการใช้ไวทัลแคร์คิท

Vital Care Kit ชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบไปด้วย

- เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด
- เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วแบบบลูทูธ
- สมาชิกแอปพลิเคชัน SaluberMD นาน 1 ปี

เพื่อช่วยให้คุณดูแลสุขภาพตัวเองและปกป้องคนที่คุณรัก



การลงทะเบียนผู้ใช้

Step 1


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SaluberMD App จาก App Store หรือ Google Play

Step 2


เปิดแอป เลือก “ลงทะเบียน” (Register) → “คนไข้” (Patient) → “ต่อไป” (Next) → ใส่โค้ดที่ได้มาในกล่อง Vital Care Kit

Step 3


อ่านเงื่อนไขการใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัว (terms of use and privacy policy) และตอบตกลง

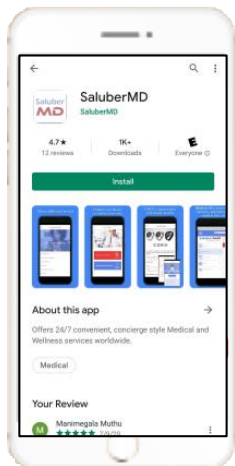

Step 1

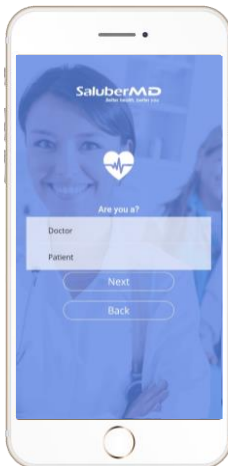

Step 2

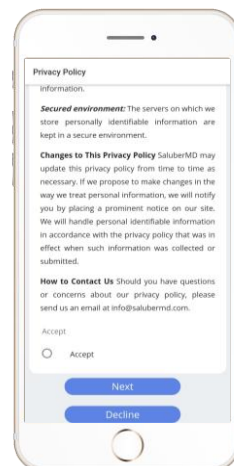

Step 3

Step 4

ใส่ชื่อผู้ใช้ (User) และรหัสพาสเวิร์ดตามที่คุณได้ตั้งไว้

Step 5


เมื่อคุณเข้าแอป คุณจะต้องใส่ข้อมูลโปรไฟล์

Step 6


ให้ความยินยอมตามที่แอปร้องขอ เพื่อเข้าร่วม SaluberMD



Step 4

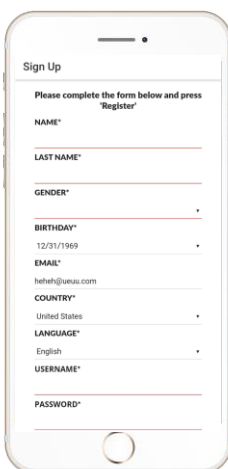

Step 5

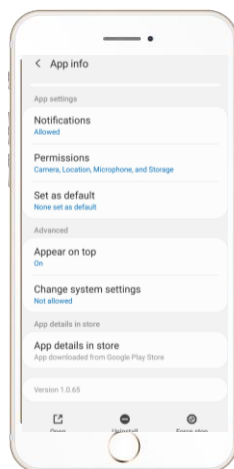

Step 6



เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

Step 1

เปิดเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

Step 2

เปิดแอป SaluberMD เลือก “กำหนดการต่างๆ” (My Health Profile) → “ข้อมูลอุปกรณ์ทางการแพทย์” (Medical Device Data) → “อุณหภูมิร่างกาย” (Body Temperature)

Step 3


คลิกเครื่องหมาย ‘+’



Step 1



Step 2

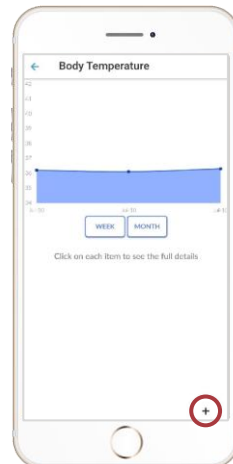

Step 3

Step 4


เลือก “ค้นหาอุปกรณ์” (Find Device)

Step 5


หน้าจอจะมีชื่อของเครื่องวัดอุณหภูมิที่เปิดเครื่องอยู่ ให้กดเลือกเพื่อเชื่อมต่อ

Step 6


เมื่อเชื่อมต่อแล้ว จะมีข้อความ “อุปกรณ์เชื่อมต่อแล้ว กำลังรอข้อมูล” (Device Connected. Waiting for data acquisition)

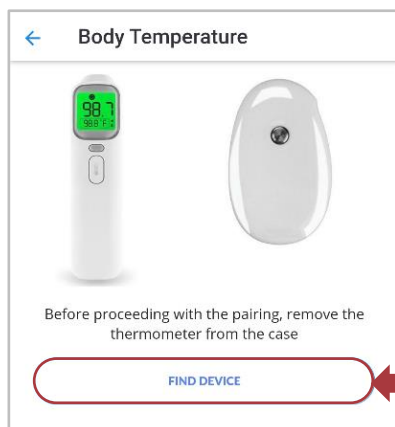

Step 4

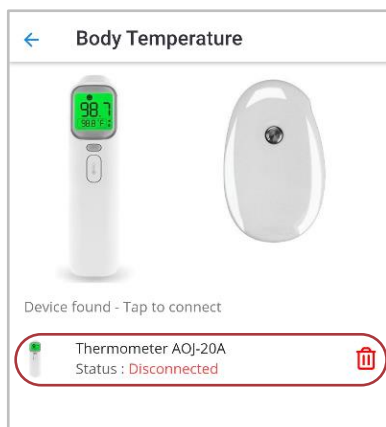

Step 5

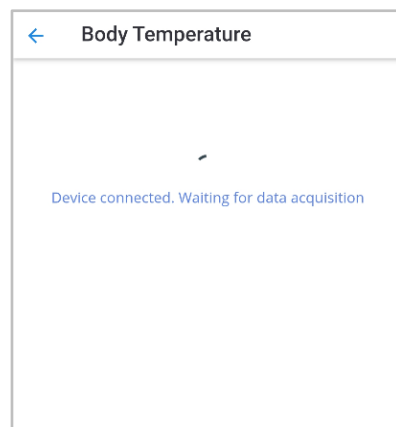

Step 6



เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

Step 7



ถือเครื่องวัดอุณหภูมิที่ระดับหน้าผากและกดเพื่อวัดอุณหภูมิ

Step 8

ทั้งเครื่องวัดอุณหภูมิและแอปจะแสดงผลการวัด

Step 9

ข้อมูลจะถูกจัดเก็บในส่วนของ “อุณหภูมิร่างกาย” (Body Temperature) ในแอป

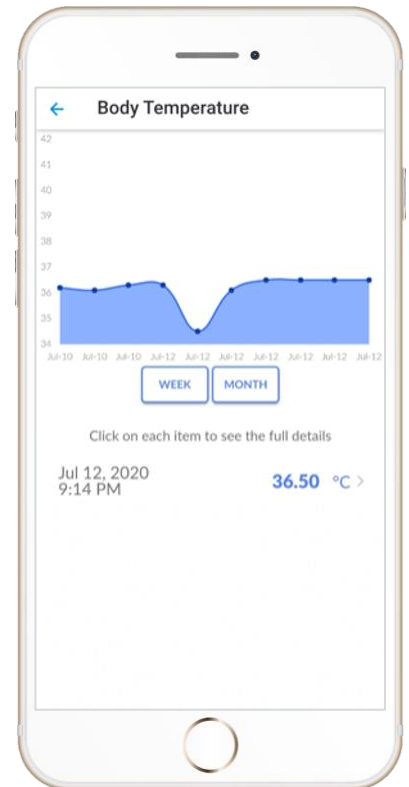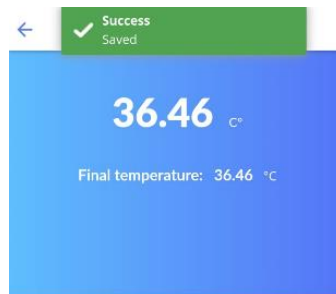

วัดอุณหภูมิ
ที่หน้าผาก



วัดอุณหภูมิ
ที่หู

วัดอุณหภูมิที่หน้าผาก – ฝาปิด
วัดอุณหภูมิที่หู – ถอดฝาปิด



Step 7

Step 8

Step 9



เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

Step 1

ถือเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วเพื่อเตรียมการวัด

Step 2

เปิดแอป SaluberMD เลือก “กำหนดการต่างๆ” (My Health Profile) → “ข้อมูลอุปกรณ์ทางการแพทย์” (Medical Device Data) → “SpO2”

Step 3

เปิดฝาเครื่องและสอดนิ้วข้างใน เครื่องจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ



Step 1



Step 2



Step 3

Step 4


เลือก “สแกน” (Scan)

Step 5


หน้าจอจะแสดงชื่ออุปกรณ์ กดเลือกเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

Step 6


เมื่อทำการเชื่อมต่อแล้ว กดเลือก “รับข้อมูล” (Get Data)

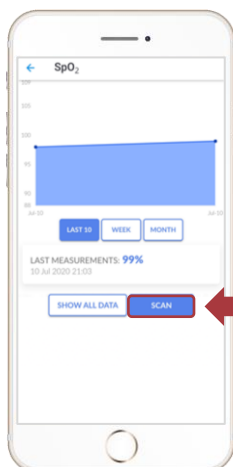

Step 4

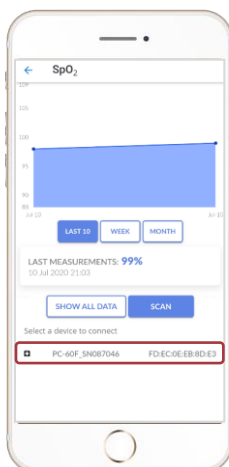

Step 5

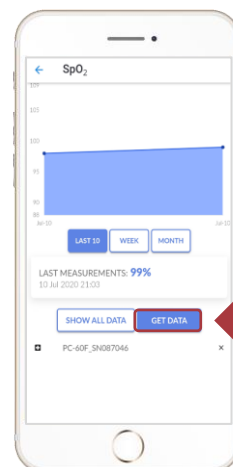

Step 6



เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

Step 7

การวัดจะใช้เวลา 30 วินาที วางนิ้วไว้ในเครื่องตลอดระยะเวลาการวัด

Step 8

หน้าจอของแอปจะมีลักษณะตามรูประหว่างที่ทำการวัด

Step 9

เมื่อเครื่องทำการวัดเสร็จสิ้น จึงสามารถนำนิ้วออก



Step 7



Step 8



Step 9

Step 10


กดลูกศรเพื่อถอยกลับ และกลับเข้าหน้า SpO2 อีกครั้ง เพื่อทำการรีเฟรชข้อมูล

Step 11


หน้าจอจะแสดงข้อมูลล่าสุด หากต้องการดูผลการวัด spO2 แต่ละครั้ง ให้กด “แสดงข้อมูลทั้งหมด” (Show All Data)

Step 12


หน้าจอจะแสดงข้อมูลการวัด SpO2 ที่เคยวัดในแต่ละครั้ง

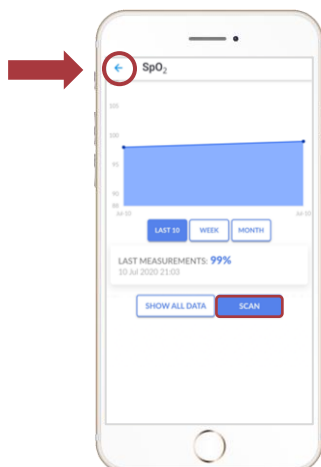

Step 10

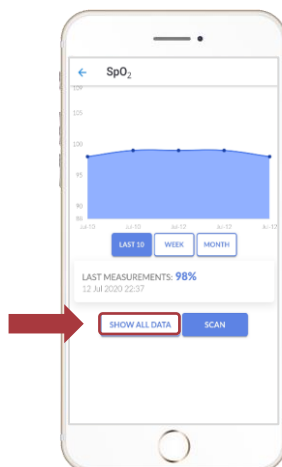

Step 11

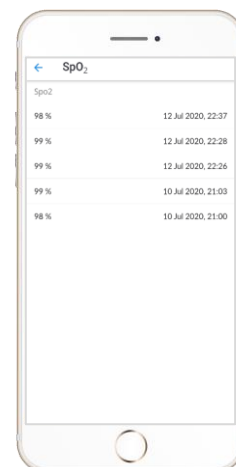

Step 12

การปรึกษาแพทย์ทางวิดีโอคอล

Step 1

หากต้องการนัดหมายเพื่อปรึกษาแพทย์ผ่านวิดีโอคอล เลือก “ดูผู้ให้บริการ” (See a provider)

Step 2

เลือกด้านที่ต้องการปรึกษา

Step 3


เลือกแพทย์



Step 1



Step 2

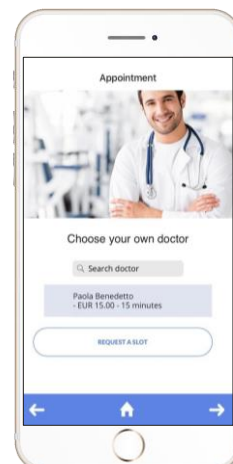

Step 3

Step 4


เลือกวันเวลาที่ต้องการ จากนั้นกดลูกศรด้านล่างขวาของจอ และกดนัดหมาย (Book)

Step 5


คุณจะได้รับการเตือนจากแอปเป็นระยะ ตั้งแต่ 2 ชั่วโมงก่อนการนัดหมาย จนถึงเวลานัดหมาย

Step 6


เมื่อถึงเวลา 5 นาทีก่อนนัดหมาย คุณสามารถเข้าระบบวิดีโอคอล โดยกดที่ข้อความแจ้งเตือน หรือเข้าไปในแอปแล้วเลือก “กำหนดการต่างๆ” → (My Health Profile) “การนัดหมายของฉัน” (My Timelines) → “การนัดหมาย” (My Appointments) → “โทร” (Call) โดยคุณต้องกรอกข้อมูล เพิ่มรูปภาพหรือเอกสารที่แพทย์ต้องการ แล้วจึงสามารถพูดคุยกับแพทย์ผ่านวิดีโอคอล

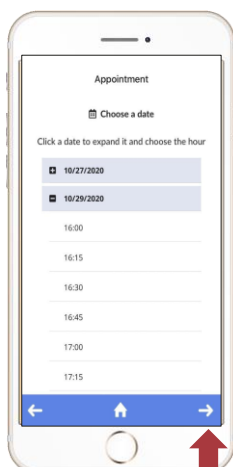

Step 4

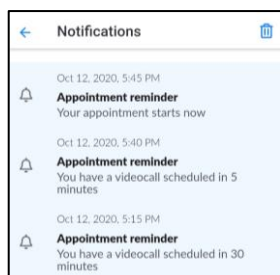

Step 5

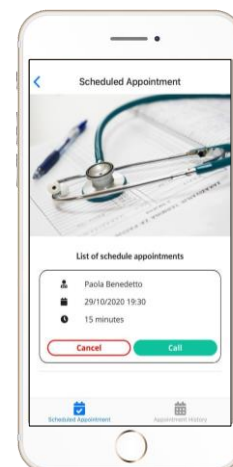

Step 6